
СЕРИЯ:
ИЗЛУЧАТЕЛИ ВЫНОСНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
для аппарата КВЧ-ИК терапии «ТРИОМЕД УНИВЕРСАЛ»

Регистрационное удостоверение
ФСР 2009/06554 от 17.08.2012 г.
Декларация о соответствии
№ РОСС RU ME77. ДОО234 от 30.10.2012

ИЗЛУЧАТЕЛЬ
«ТРИОВУМЕН»
(№ 8)

Применение специализированных излучателей обеспечивает направленное действие на органы и ткани, системы органов и функциональные системы организма. Разработаны на основе генератора ЭМИ КВЧ «BioTrEM®» (международный патент № EE 05541)

Для женского здоровья

ИЗЛУЧАТЕЛЬ «ТРИОВУМЕН» (№ 8)

Предназначение: применяется в комплексных программах профилактики, лечения и реабилитации при заболеваниях женской половой сферы, нарушениях репродуктивного и сексуального здоровья женщин, при нарушениях гормональной регуляции.

Направленность воздействия: центры вегетативной и нейроэндокринноиммунной регуляции, органы эндокринной системы (с учетом специфики регуляции женской половой системы).

Время работы излучателя: 10 минут

Краткая справка

Возрастные изменения затрагивают деятельность эндокринной системы, нарушая репродуктивные, адаптационные и энергетические функции.

Деятельность половой системы прямо связана с возрастом, а интенсивность продукции половых гормонов в значительной степени определяет биологический возраст. После 45 лет на фоне общих возрастных изменений в организме женщины

постепенно угасают сначала детородная, а затем и менструальная функции.

Снижение и прекращение функций половых желез у женщин проявляется в виде сложного симптомокомплекса — климакса, который затрагивает деятельность эндокринной, нервной, сердечно-сосудистой и других систем, а также проявляется изменениями в сексуальной жизни и психоэмоциональной сфере. Климактерический синдром часто проявляется приливами (чувством жара), головными болями, повышением артериального давления, снижением работоспособности. Климактерические изменения затрагивают также все виды обмена веществ, в частности происходит нарушение кальциевого и липидного обмена, усиливаются окислительные процессы.

Наступление климакса связано с недостаточной продукцией женских половых гормонов — эстрогенов, из-за возрастного снижения чувствительности циклического и тонического центров гипоталамуса, регулирующих в женском организме продукцию половых гормонов.

Эффекты применения аппарата КВЧ-ИК терапии «ТРИОМЕД УНИВЕРСАЛ» с излучателем «Триовумен»:

- повышение чувствительности центров регуляции продукции женских половых гормонов;
- повышение чувствительности тканей к женским половым гормонам;
- активизация антиоксидантных систем;
- вегетостабилизирующее действие;
- общеукрепляющее действие;
- повышение общего иммунитета.

Рекомендации к применению

Ниже представлена схема курсового применения аппарата КВЧ-ИК терапии «ТРИОМЕД УНИВЕРСАЛ» с излучателем «Триовумен» при различных нарушениях гормональной регуляции у женщин (*Методические рекомендации «Особенности применения модулированного крайне высокочастотного электромагнитного излучения в клинической практике», разработанные в ЧОУ ВПО «Санкт-Петербургский медико-социальный институт», 2012 г.*).

Биологически активные зоны кожных покровов, рекомендуемые для воздействия, обозначены в соответствии с нумерацией зон BioTrEM-воздействия¹, используемой в методической литературе компании

¹Зоны BioTrEM-воздействия — это специально подобранные, оптимальные зоны для лечебного воздействия аппаратами КВЧ-ИК терапии, имеющими в качестве излучателя генератор ЭМИ КВЧ «BioTrEM®».

СЕММЕД. В приложении на странице 8 даны соответствующие обозначения по международной (французской) классификации.

Дополнительно рекомендуются для воздействия зоны дискомфорта или максимальной болезненности, определяемые при прощупывании (пальпации).

Рекомендуемая схема:

(курс можно повторять 2–3 раза в год)

1-й день: зона 41 слева + зона 79 справа;

2-й день: зона 41 справа+ зона 79 слева;

3-й день: зона 58 слева + зона 16 справа;

4-й день: зона 58 справа + зона 16 слева;

5-й день: зона 89 + зона 42 слева;

6-й день: зона 89+ зона 42 справа;

7-й день: зона 19 слева + зона 3 справа;

8-й день: зона 19 справа+ зона 3 слева.



Зона 3 – воздействие на зону тыльной поверхности средней трети стопы, между I и II пальцами



Зона 16 – воздействие на зону между IV и V плюснефаланговыми суставами




Зона 19 – воздействие на зону, расположенную у лучезапястного сустава на 1,5 см выше лучезапястной складки со стороны мизинца




Зона 41 – воздействие на зону, расположенную у внутреннего свода стопы




Зона 42 – воздействие на зону у заднего края большеберцовой кости примерно на 6 см выше внутренней лодыжки (на границе между нижней третью и верхних двух третей голени)

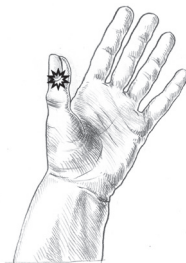

Зона 58 – воздействие на зону у основания ногтя большого пальца кисти

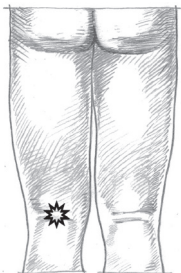

Зона 79 – воздействие на зону середины подколенной ямки

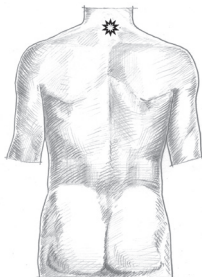

Зона 89 – воздействие на зону между VII шейным и I грудным позвонками

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица соответствия зон BioTrEM-воздействия и их нумерации, принятым в методической литературе компании «СЕММЕД» точкам акупунктуры, их обозначению по международной (французской) классификации.

	Точка	BioTrEM зона		Точка	BioTrEM зона
F	F 3	3	Rp	Rp 6	42
VB	VB 43	16	P	P 11	58
C	C 6	19	V	V 40	79
Rp	Rp 4	41	VG	VG 14	89